


Cell Saver® Elite™

术中自体血回输的新标准

一体化设备

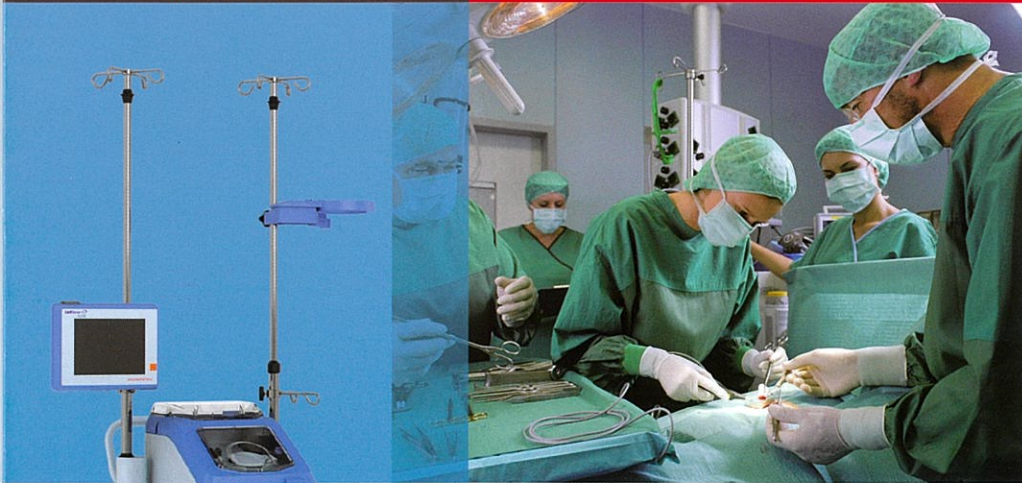


HAEMONETICS®

血液管理从手术室开始



一如既往的稳定品质

自从1976年CellSaver®技术上市以来, Haemonetics一直是术中自体血回输技术的行业领导者。Cell Saver®Elite™是最新一代的自体血回收机,除了维持原有的稳定品质和可靠信誉,还改善了使用的便利性。

自体血回收, 避免异体输血

Cell Saver®Elite™系统适用于冠脉搭桥、瓣膜置换、创伤、移植、骨科和其他中度至大量出血的外壳手术。Cell Saver®Elite™清除游离血红蛋白等几乎所有杂质,产出Hct 40-60%的红细胞,有效地减少和避免必要的异体输血。

内置SmartSuction®技术减少溶血

已经证实SmartSuction®负压吸引技术可以有效地减少溶血的发生, Haemonetics在Cell Saver注册Elite™系统中整合加入了SmartSuction®负压吸引设备,回收更多有用的红细胞。SmartSuction比传统的墙式负压更稳定更精准。墙式吸引可能会因为管路扭结、校准不精确或者单一负压吸引源超出使用限度,而造成实际的吸引力减小。

SmartSuction®技术可以维持最佳的吸引力,保护红细胞和组织的完好,不受破坏。

先进的技术改善数据通信功能

Cell Saver®Elite™系统改善了数据的收集和传送。

- 内置条形码阅读器便于数据输入,例如耗材型号、序列号、患者编号、手术医师编号等。
- USB端口,可以快速下载多大100个手术数据及相关耗材信息。
- 专利的数据管理应用软件,用于数据存储和报告。

用户友好的使用界面， 改善操作的便利性

Cell Saver®Elite™自体血回收机，运用专利的数据管理软件收集数据，提供快速简便的耗材安装，通过彩色触摸屏显示友好的用户使用界面、直观易读的数据图表，并且在手术过程中可以直接访问在线帮助菜单。

Cell Saver®Elite™——您的最佳选择

清洗质量

>95%白蛋白清除率
>98%游离血红蛋白清除率
>99.8%肝素清除率

数据收集和管理

内置条形码阅读器，USB端口，数据管理应用软件

负压吸引

内置SmartSuction®负压吸引器，
或者手动调节负压最大至-250mmHg

彩色触摸屏

直观易读的图表显示及在线帮助

可编程的参数设置

使用者可自行定义特殊的采集参数，并保存便于今后使用。

分离装置

莱森杯和吹塑杯

多种杯型

70mL, 125mL, 225mL

改进的血小板分离方案

简便的耗材及使用界面

半杯处理技术

FDA批准的部分装满离心杯清洗技术，最大程度地回输红细胞

状态指示灯

突出的指示灯，让使用者在手术室的任何方位，
一眼就能识别系统的工作状态

增加存储空间

方便可移动的储物箱，存放耗材、盐水和记录文档

轻巧灵便

增加了设备的灵活性和可移动性，便于在医院内的运送

便于安装

全新的耗材管路设计，便于安装



产品描述

产品型号

每箱数量

■ Cell Saver Elite 自体血回收机	CSE-E-CM	1
■ Cell Saver Elite 车架	CSE-EA-1000	1
■ Cell Saver Elite 处理耗材套装 (225mL)	CSE-P-225	8
■ Cell Saver Elite 处理耗材套装 (125mL)	CSE-P-125	8
■ Cell Saver Elite 处理耗材套装 (70mL)	CSE-P-70	8
■ Cell Saver Elite 术前分离耗材	CSE-SQ-1000	8
■ Cell Saver® 储血罐, 150µm, 3L	00205-00	4
■ Cell Saver® 抗凝吸引管路	00208-00	20

唯美(上海)管理有限公司

地址: 上海市长乐路989号世纪商贸广场
2501-03&2510-11室
邮编: 200031
电话: (86 21) 5389 5200
传真: (86 21) 5466 8852

唯美(上海)管理有限公司 北京分公司

地址: 北京东直门外大街35号
东湖别墅C701室
邮编: 100027
电话: (86 10) 6467 2900
传真: (86 10) 6466 5430

唯美(上海)管理有限公司 广州分公司

地址: 广州市越秀区环市东路371-375号
世贸中心南塔2107室
邮编: 510095
电话: (86 20) 8762 8749
传真: (86 20) 8762 2761

唯美(上海)管理有限公司 成都分公司

地址: 成都市人民南路4段19号
威斯顿联邦大厦1206室
邮编: 610041
电话: (86 28) 8559 9352
传真: (86 28) 8509 9685

技术参数

■ 主机 (长X宽X高)	54.6cm x 41.9cm x 29.8cm
■ 主机带推车 (盐水柱拉起)	67.3cm x 182.9cm x 53.3cm
■ 主机带推车 (盐水柱放下)	67.3cm x 21.9cm x 53.3cm
■ 主机重量	< 25kg
■ 推车重量	< 18kg
■ 泵速	0-1000ml/min (可调节)
■ 离心机速度	莱森杯5650rpm 吹塑杯7500rpm 术前分离2050-5650rpm (可调节)
■ 电压	100-240 VAC±10%
■ 保险丝额定值	100-240 V:T3.15A250V
■ 操作频率	47-63Hz
■ 电线总长	4.9m

RxOnly