


扫描检测仪自带报告

轻松、便捷地解答医护人员
所希望了解的问题

需要了解葡萄糖的变化吗？

显示每一天传感器葡萄糖的趋势和变化

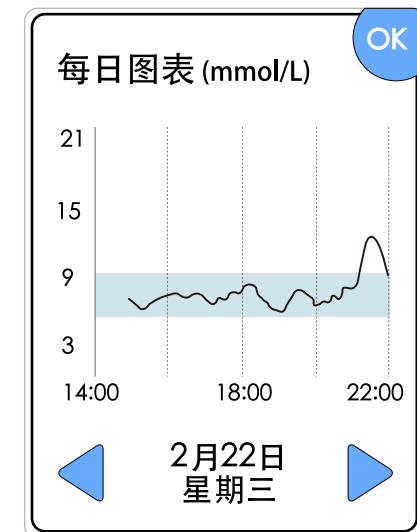

改变正在发生

- 显示完整葡萄糖图谱，方便指导患者糖尿病治疗方案
- 快速扫描，无需忍痛
- 单个传感器可储存长达14天全部数据

全景曲线 深入决策

请为您的患者使用

辅理善**瞬感**®医院用
动态葡萄糖监测系统



预期用途

辅理善瞬感®医院用 | FreeStyle Libre H 动态葡萄糖监测系统预期用于监测18周岁以上糖尿病患者组织间液葡萄糖水平的连续变化趋势并跟踪其动态波动趋势，辅助监测高血糖和低血糖的发生，不能作为治疗药物调整的依据。该产品由专业医护人员使用。患者只有通过咨询专业医护人员才能获得系统读数。

了解更多信息，请访问www.freestyle-libre.cn

辅理善瞬感®医院用动态葡萄糖监测系统是雅培别具医学智慧的葡萄糖监测产品，帮助糖尿病患者通过扫描方式获得葡萄糖数据，为医生提供完整葡萄糖图谱，更好地定制患者的治疗方案。

我们相信，通过先进科技和便捷监测，我们可以支持糖尿病人健康生活，为生命健造可能和精彩！

生命·健造可能

life. to the fullest.



动态葡萄糖监测系统 注册证编号：国械注进20173215196

内部审批号：20170704-ADC-HCP

有效期：2017/07-2018/06

本资料仅供医疗卫生专业人士参考

禁忌内容或注意事项详见说明书。请仔细阅读产品说明书或在医务人员的指导下购买和使用。



全景曲线 深入决策



辅理善 | FreeStyle

瞬感®医院用
动态葡萄糖监测系统

Libre^H

FLASH CONTINUOUS GLUCOSE MONITORING SYSTEM

全景曲线 深入决策



辅理善**瞬感**®医院用
动态葡萄糖监测系统

准确 方便 一目了然

全景曲线: 扫描获取最长14天动态葡萄糖数据
深入决策: 帮助医生决策，发现高、低血糖事件
准确方便: 单个扫描检测仪可扫描多个患者




院内血糖监测无法满足医生，护士的需求

检测血糖至关重要，但对患者而言，传统指尖采血的疼痛和麻烦让他们望而却步¹


医生对于院内检测的担心

医生%

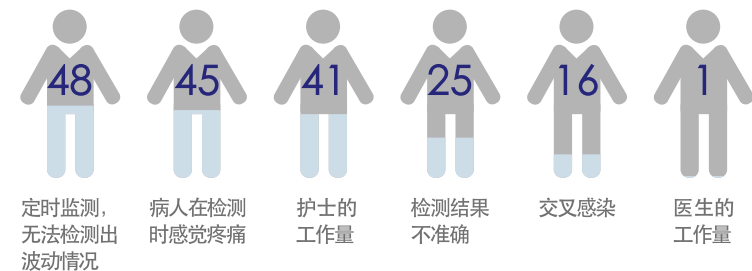

医生认为频繁院内检测对于医护人员工作量的影响

医生%

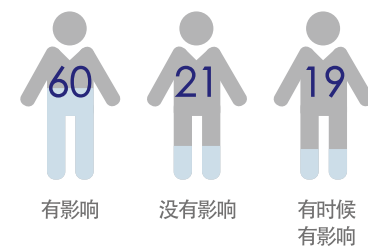

参考文献：

1. Paul Zhou, et al., Illuminera Group150947Blood Glucose Monitoring Project Report P28



辅理善瞬感®医院用动态葡萄糖监测系统

给医生带来全新血糖管理体验



扫描检测仪对传感器的快速扫描

- 只需轻轻一扫，即可了解葡萄糖读数[‡]
- 显示当前葡萄糖读数，最近8小时葡萄糖历史以及指示葡萄糖变化趋势箭头[§]
- 可一次性获取14天的传感器数据[†]
- 1个扫描仪可检测多个传感器

[‡] 当血糖水平快速变化时，组织液葡萄糖无法准确反映血糖水平；当系统提示发生低血糖或接近低血糖时；或者当患者的症状与系统读数不符时，仍需进行指血检测。详见产品说明书。

[§] 葡萄糖变化趋势箭头可能不会始终与读数一起显示。

[†] 在获取下一个传感器数据时，上一个传感器数据会被覆盖。

消除院内血糖监测的各种疑虑

传感器

- 比1元硬币略大，佩戴隐蔽
- 14天自动进行葡萄糖测量
- 无需指尖血校准
- 传感器防水，泡澡、淋雨和游泳时皆可佩戴[‡]
- 长达14天数据储存

扫描检测仪

- 65克便于手持和携带
- 可透过衣物扫描[§]
- 可一次性获取14天的传感器数据[†]
- 触摸屏背光设计，方便在黑暗中查看读数



[‡] 请勿将传感器带入超过1米（3英尺）深的水中或将其浸在水中超过30分钟

[§] 扫描检测仪最多只能隔4厘米厚的衣物进行扫描

[†] 在获取下一个传感器数据时，上一个传感器数据会被覆盖